

# SONESTA S2 & S3

## Maintenance & Nettoyage

### Maintenance

Une fois par semaine, testez le bon fonctionnement du dispositif et inspectez les câbles pour vérifier qu'ils ne sont ni coupés ni endommagés. En cas de doute, remplacez les pièces concernées. Le dispositif doit être nettoyé régulièrement, comme décrit ci-dessous. Une maintenance préventive supplémentaire est requise conformément au manuel d'entretien.

### Nettoyage

- Débranchez l'unité du secteur avant toute désinfection.
- Essuyez toutes les surfaces après chaque patient.
- Veuillez noter qu'il est recommandé de retirer le coussin du siège après chaque utilisation et d'essuyer l'arrière du coussin ainsi que les surfaces situées sous le coussin.
- Nettoyez le fauteuil avec un chiffon humide et des désinfectants ordinaires. Suivez les procédures établies pour le nettoyage des fluides corporels des surfaces du fauteuil.
- Utilisez l'un des désinfectants recommandés ci-dessous sur toutes les surfaces. À défaut, utilisez un autre désinfectant avec une dilution d'eau de Javel au 1/10 (hypochlorite de sodium à 5,25 %).

#### Désinfectants recommandés :

- Lingette à l'eau de Javel PDI Sani-Cloth SANI-CLOTH ® : lingette germicide jetable.
- Lingettes désinfectantes Clorox HealthCare®



**ATTENTION :** un nettoyage insuffisant ou l'absence de nettoyage après chaque utilisation du fauteuil affecte l'aspect et les performances.



**ATTENTION :** les désinfectants de type iodophore (bétadine, par exemple) peuvent tacher les coussins.



**ATTENTION :** le contact prolongé avec des solutions d'eau de Javel à la dilution inappropriée dans un agent nettoyant peut damage affecter l'aspect et les performances.