

SONESTA S2 & S3

Mantenimiento & Limpieza

Mantenimiento

Una vez por semana debe probar las funciones del equipo e inspeccionar los cables para descartar cortes y otros daños. Si tiene dudas acerca de una pieza, reemplácela. El equipo debe ser aseado frecuentemente, como se detalla a continuación. También requiere de mantenimiento preventivo adicional, como se detalla en el Manual de Servicio.

Limpieza

- Debe desconectar la unidad de la toma de corriente antes de desinfectar.
- Limpie todas las superficies luego de cada uso.
- Observe que se recomienda remover el cojín del asiento luego de cada uso para limpiar la superficie debajo del cojín, así como su parte trasera.
- Limpie la silla con un trapo húmedo y desinfectante corriente. Para limpiar las superficies de la silla, siga los protocolos establecidos para limpieza de fluidos corporales.
- Aplique alguno de los desinfectantes recomendados, indicados a continuación, sobre todas las superficies. De no ser posible, utilice cualquier desinfectante diluido de 1:10 en blanqueador (5,25% hipoclorito de sodio).

Desinfectantes recomendados:

- Toallas desinfectantes PDI Sani-Cloth SANI-CLOTH ®: toallas germicidas desechables.
- Clorox HealthCare Disinfecting Wipes ®



ADVERTENCIA: Al no limpiar la silla o limpiarla deficientemente luego de cada uso generará daños en su apariencia y desmedro de sus funciones.



ADVERTENCIA: Desinfectantes de tipo yodofóricos (por ejemplo, betadine) podrían manchar los cojines.



ADVERTENCIA: El contacto prolongado con soluciones blanqueadoras en proporciones inapropiadas de dilución con cualquier agente de limpieza podría generar daños en su apariencia así como en su funcionalidad.

